



## **BM-DESK**

# **GUIDE DE L'UTILISATEUR**



# 1 - Instructions de sécurité

## Informations importantes de sécurité

Cet appareil a été créé pour fonctionner en lieu chauffé et isolé de toute forme d'humidité ou de projection d'eau. Toute utilisation en lieu humide, non-protégé, ou soumis à des variations de températures importantes peut représenter un risque tant pour l'appareil que pour toute personne à proximité.



Seuls les services techniques compétents et reconnus par Audiophony sont habilités à réaliser la maintenance de cet appareil. Les gestes courants d'entretien doivent respecter les précautions de ce manuel.



Cet appareil contient à l'intérieur de son boîtier, des parties non isolées sous tensions suffisamment élevées pour représenter un risque de choc électrique. Vous ne devez en aucun cas réaliser la maintenance de cet appareil lorsque celui-ci est sous tension.

## Symboles utilisés



Le symbole IMPORTANT signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole WARNING signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente. Le produit peut de plus être endommagé.



Le symbole CAUTION signale un risque de dégradation du produit.

## Instructions et recommandations

### 1 - Lisez les instructions :

Il est conseillé de bien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

### 2 - Conservez les instructions :

Il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement ultérieurement.

### 3 - Considérez les avertissements :

Il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit.

### 4 - Suivez les instructions :

Il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

### 5 - Eau et humidité :

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une piscine; ni dans un endroit humide ou près d'une piscine, etc...

### 6 - L'installation :

Ne posez pas cet appareil sur un meuble roulant, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil risquerait de tomber blessant gravement un enfant ou un adulte et de s'abîmer sérieusement. Utilisez seulement un meuble roulant, une étagère, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci.

Il est fortement conseillé de déplacer avec prudence le meuble roulant quand l'appareil se trouve dessus. Des arrêts brutaux, une trop forte poussée et des surfaces rugueuses risqueraient de renverser l'ensemble.

### 7 - Montage en plafonnier ou sur un mur :

Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage.

### 8 - Aération :

Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération, pour assurer une utilisation en toute confiance du produit et pour éviter une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ni recouvertes. Il faut faire attention à ne jamais obstruer ces ouvertures en plaçant le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou autre surface de ce style. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation fermée tels une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies.

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**ATTENTION** : Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil. Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.

**Niveaux sonores**

Les systèmes de sonorisation sont capables de délivrer un niveau sonore (SPL) nuisible à la santé humaine. Les niveaux de pression sonore apparemment non critiques peuvent endommager l'audition si la personne y est exposée sur une longue période.  
Ne pas stationner à proximité immédiate des enceintes acoustiques en fonctionnement.

**Protection de l'environnement**

- L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS.
- Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.
- Pour plus de renseignements <http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php>.

### 9 - Chaleur :

Il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels les radiateurs, les poêles, les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

### 10 - Alimentation électrique :

Ce produit fonctionne seulement sur le voltage indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.

### 11 - Protection des câbles électriques :

Il faut veiller à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre, en faisant particulièrement attention aux câbles au niveau des prises et de leur point de sortie sur l'appareil.

### 12 - Pour nettoyer :

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utilisez un chiffon humide sur la surface de l'appareil. Ne passez pas l'appareil sous l'eau.

### 13 - Période de non utilisation :

Débranchez le cordon d'alimentation de votre lecteur si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.

### 14 - Pénétration d'objets ou de liquides :

Ne laissez jamais pénétrer d'objets en tout genre dans cet appareil à travers les ouvertures car ils risqueraient de provoquer une incendie ou une décharge électrique. Ne répandez jamais de liquides en tout genre sur le produit.

### 15 - Dommages nécessitant un entretien :

- Adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :
  - Quand le cordon d'alimentation ou la prise est abîmée(e).
  - Si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil.
  - Si le produit a été au contact de pluie ou d'eau.
  - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
  - Si le produit a pris un choc.

### 16 - Entretien/révision :

N'essayez pas de réviser vous-même ce produit. Cela vous exposerait à une dangereuse tension. Adressez-vous à un personnel qualifié.

### 17 - Milieu de fonctionnement :


Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 à +35° ; humidité relative inférieure à 85% (orifice de ventilation non obstrués). N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou dans un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

## 2 - Introduction

La boucle magnétique portable est une solution polyvalente. Mobile, elle s'intègre parfaitement sur vos bureaux et elle peut être déplacée à volonté.

Elle s'utilise dans le cadre de conversation en petit groupe, l'idéal étant deux personnes, dans de petits espaces comme des bureaux.

## 3 - Composants

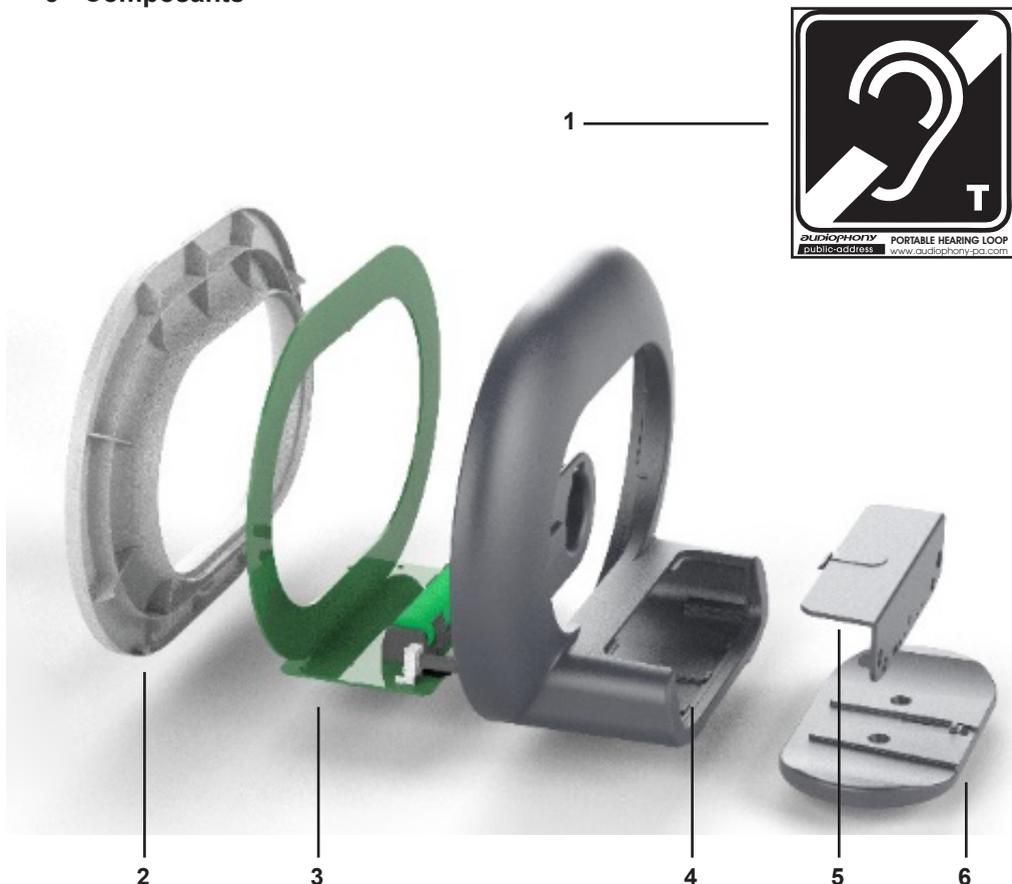


1. Autocollant « espace adapté aux personnes souffrant de perte auditive »
2. Cache avant
3. Antenne pour boucle à induction
4. Emplacement pour batterie
5. Cache de la batterie
6. Socle du BM-DESK

#### 4 - Charger la boucle magnétique portable


Note: il est important de charger complètement votre boucle magnétique portable avant de l'allumer une première fois à sa réception.

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur
2. Branchez le câble d'alimentation à la boucle magnétique à l'arrière du boîtier en utilisant la prise "DC IN". Des LED's situées à l'arrière indiquent lorsque la batterie est faible ou lorsqu'elle est en charge.
3. Le témoin passera en vert lorsque la charge sera complète.


#### 5 - Régler la boucle magnétique portable

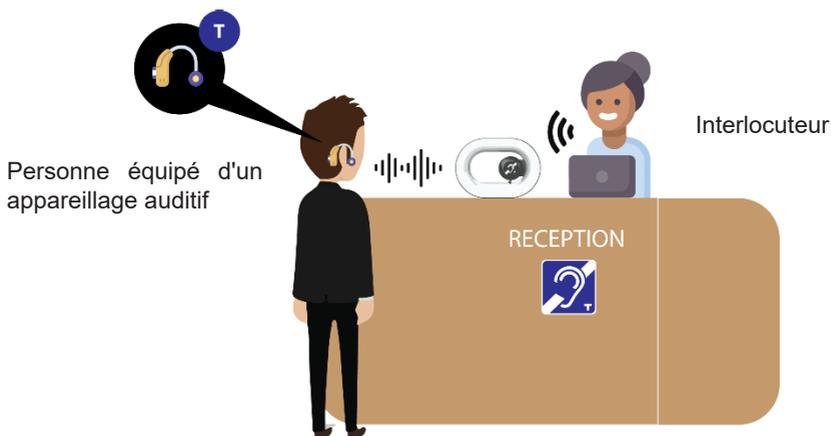

1. Placez la boucle magnétique portable entre le porteur de l'appareil auditif et la deuxième personne sur le bureau
2. Assurez-vous que l'arrière de la boucle magnétique, équipée du microphone, soit bien orientée vers la personne non appareillée.
3. L'avant de l'appareil doit faire face à la personne souffrant de perte auditive.
4. Appuyez sur le bouton central (POWER).
5. Le système est maintenant prêt à être utilisé.

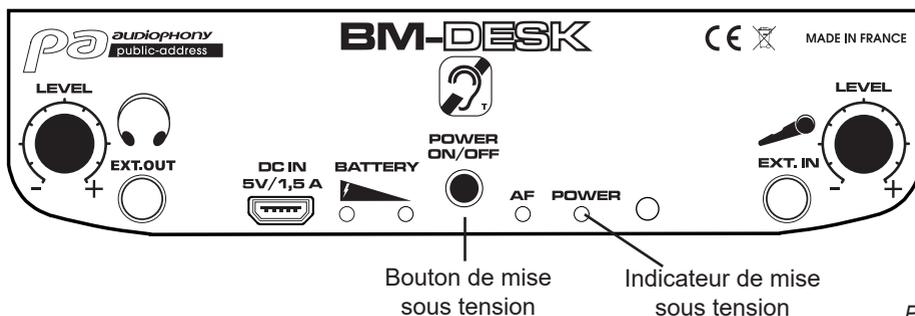


## 6 - Panneau arrière

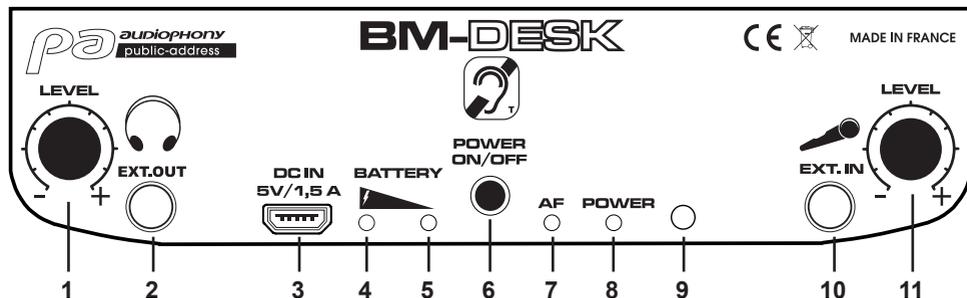

- |   |  |
|---|--|
| 1. Potentiomètre pour sortie casque externe | 7. Voyant de diffusion de la parole    |
| 2. Prise Jack pour casque externe optionnel | 8. Voyant de fonctionnement            |
| 3. Entrée alimentation                      | 9. Capsule microphone (interne)        |
| 4. Voyant de chargement                     | 10. Prise Jack microphone externe      |
| 5. Voyant de batterie faible                | 11. Potentiomètre de niveau des micros |
| 6. Bouton de mise sous tension              |  |

## 7 - Signification des voyants

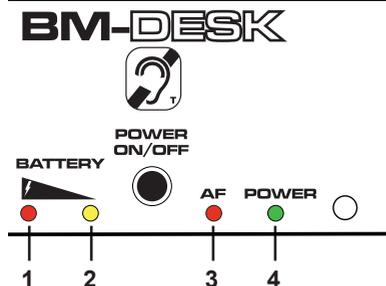

1. Batterie en charge
2. Batterie faible
3. Courant de sortie
4. Alimentation

## 8 - Utilisation

Une fois la boucle magnétique mise en route, vous pouvez démarrer votre conversation normalement:

En fonctionnement normal, si le témoin (3) s'allume rouge lorsque vous parlez, cela indique que le système fonctionne.

Si le porteur de la prothèse ne capte pas un signal clair :

1. Assurez-vous que la boucle magnétique portable est bien chargée.
2. Ajustez la position de la boucle sur le bureau, le porteur de la prothèse ne doit pas être à plus de 1,1 mètre de la boucle.

3. Assurez-vous que le porteur a bien enclenché la position T de sa prothèse auditive.
4. Demandez au porteur de l'appareil auditif de vérifier les réglages du volume de son appareil.


Si vous avez suivi les étapes ci-dessus et que le porteur de la prothèse ne réussit toujours pas à entendre un signal clair, cela peut être dû :

- À un défaut de la boucle
- À un défaut de la prothèse auditive du porteur
- Au fait que la bobine de l'appareil auditif du porteur ne soit pas activée.

## 9 - Connexions additionnelles

### 9-1 Microphone externe

Si plus de deux personnes font partie de la conversation, il est fortement recommandé d'utiliser une boucle adaptée au grande surface. Si vous n'en avez pas de disponible, il est néanmoins possible d'utiliser un microphone externe.

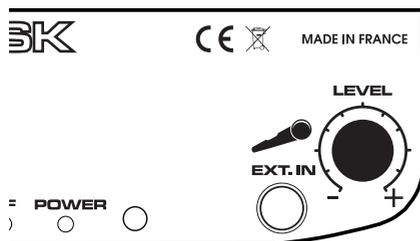

1. Insérez la prise du microphone dans la prise EXT-IN située à l'arrière de l'appareil.
2. Placez le microphone externe vers ceux qui parlent.

### 9-2 Source sonore externe

Pour connecter la boucle à un téléviseur ou à une autre source sonore externe, raccordez la boucle à l'aide d'un cordon jack/jack.

1. Insérer la connexion jack dans la prise appropriée de votre source sonore.
2. Insérer la prise jack dans la prise EXT-IN à l'arrière de la boucle portable.
3. Positionnez la boucle de manière à ce qu'elle soit face au porteur de l'appareil auditif.

Note: Le microphone interne est inactif lorsque le microphone externe est connecté.

## 10 - Informations importantes

- Un voyant vert vous informe du bon fonctionnement de l'appareil.
- Si la batterie est faible, un témoin lumineux jaune (2) clignotera
- L'appareil peut être chargé pendant son utilisation.
- Lorsque la boucle magnétique portable n'est pas utilisée, elle doit être connectée à son chargeur secteur. Cela consommera très peu de puissance.

Note: Le temps d'utilisation de l'appareil avec charge complète et non branché sur secteur est d'environ 10h. Il faut 4h pour une charge complète

## 11 - Caractéristiques techniques

### ENTRÉES AUDIO

Microphone intégré	Microphone capsule
Prise microphone	1 x Jack 3,5 mm
Alimentation fantôme	5 V, 1 mA

### SORTIE AUDIO

Prise combiné	1 x Jack 3,5 mm
---------------	-----------------

### ALIMENTATION

Voltage / Courant	5 Vdc / 1,5 A
Connecteur	Micro USB
Type de batterie	Lithium Ion 3,7 V 4000 mAh
Autonomie	10 heures
Temps de charge	4 heures

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant de sortie	3,5 A RMS
Protections	Résistance thermique Surcharge
Portée du champs magnétique	1,10 m
Température d'utilisation	De 0°C à 40°C

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions	250 x 185 x 80 mm
Poids net	366 g
Emballage	Carton
Dimensions de l'expédition	400 x 250 x 100 mm
Poids de l'expédition	1 Kg