



BM-TEST

GUIDE DE L'UTILISATEUR

1 - Présentation du produit

L'écouteur de boucle magnétique est un dispositif compact qui permet aux personnes non appareillées d'écouter un système de boucle magnétique comme s'ils portaient une aide auditive en position « T ».

Il peut être utilisé pour:


- Vérifier la source sonore d'une boucle magnétique
- Équiper une personne malentendante et non appareillée
- Équiper une personne malentendant dont la prothèse ne dispose pas de position « T ».

2 - Composants

Casque

Bouton de réglage du volume

LED

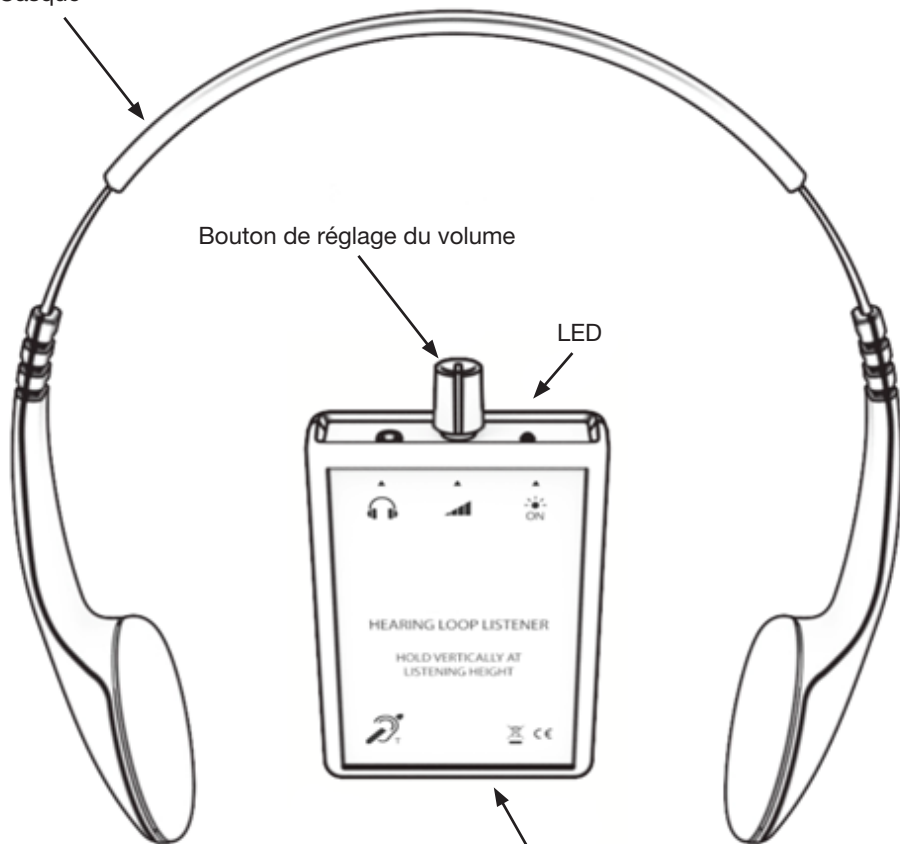

Écouteur de boucle

Note: Le BM-TEST n'est pas un mesureur de champ magnétique et ne permet pas de faire une mise en service à la norme EN60118-4. Pour cela vous devez utiliser le BM-SCAN Audiophony®

3 - Fonctionnement

L'écouteur de boucle fonctionne avec deux piles alcalines AAA.

1. Placez le casque sur vos oreilles et ajuster le pour obtenir une écoute confortable.
2. Tenez l'écouteur de boucle à la verticale et à hauteur de tête pour imiter la position d'une prothèse auditive.



3. Allumez l'appareil en tournant légèrement le bouton du volume dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir un son d'écoute confortable. Tournez le bouton en sens inverse pour baisser le volume au besoin.
4. Si la LED ne s'allume pas, vérifiez que les piles fonctionnent et soient correctement placées comme indiqué à l'intérieur de la batterie.
5. Si la LED s'allume mais que vous ne parvenez pas à entendre un son, demandez à un collègue ou à un utilisateur de parler en position microphone sur le système de boucle auditive ou testez la source d'entrée si le son est connecté. Revérifiez la réception de l'écouteur de boucle.
6. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'écouteur, tournez le bouton de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

Important

Toujours éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour augmenter sa durée de vie.

Maintenez toujours l'écouteur à hauteur d'oreille et à la verticale lors de l'écoute d'un système de boucle pour garantir les meilleures performances possibles.

4 - Maintenance

Pour prolonger la durée de vie du produit, effectuez régulièrement les opérations suivantes:

Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec ou des lingettes nettoyantes adaptées. N'utilisez pas de nettoyeur à base de solvant et éviter de faire rentrer toutes sortes de liquide dans l'écouteur.

Éteignez l'écouteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

5 - Dépannage

Symptôme	Défaut possible	Action
La LED d'allumage ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les piles sont vides 2. Il y a un défaut interne 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez les piles avec de nouvelles (alcalines AAA) 2. Contactez votre revendeur
Sifflement entendu à travers la boucle	Interférences	En haut du compartiment à pile de l'appareil, vous disposez d'un commutateur de filtre à bruit accessible en retirant les piles. Déplacez l'interrupteur vers la droite pour l'allumer.
Aucun son de la boucle n'est entendu dans l'écouteur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le son n'est pas assez élevé. 2. L'écouteur n'est pas à une distance appropriée pour écouter la boucle. 3. La boucle magnétique ne fonctionne pas. 4. Le casque a un défaut. 5. Défaut interne. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Montez le volume. 2. Rapprochez l'écouteur de la boucle. 3. Utilisez un autre écouteur de boucle ou système d'écoute (si possible) pour vous assurer que la boucle fonctionne. Si aucun son ne sort de la boucle, contactez votre revendeur. 4. Remplacez le casque d'écoute. 5. Suivez l'étape 3. Si le son est entendu avec un autre dispositif, contactez votre revendeur pour changer l'écouteur de boucle.

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony.com
AUDIOPHONY® est une marque déposée par **HITMUSIC SAS** - Parc d'activités Cahors Sud - En teste - 46230 FONTANES - FRANCE